

Áramlásos kromatográfiás immunoassay | Beteggyógyászati vizsgálat | Könnyen használható

Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM Gyorsteszt

Ideálisan használható, 15 perces diagnosztikai teszt a SARS-CoV-2 vírusos fertőzés kimutatására

- Minta: 10 µl szérum/plazma/teljes vérminta
- Gyorsan és könnyen használható: tesztenként 15 perc, könnyen azonosítható eredmények, külön felszerelést nem igényel
- A különböző egészségügyi rendszerek számára is elérhető: a teszt bárhol használható, nem szükséges hozzá külön képzést elvégezni
- Pontos és megbízható eredmények, nagy teljesítmény
- A gyors működésnek köszönhetően az orvosok azonnali eredményt kapnak, a CT vizsgálatok és a további tesztek eredményeivel együtt




Életek megmentésével
foglalkozunk



Cellex

Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM Kazetta Gyorsteszt

3 egyszerű lépés

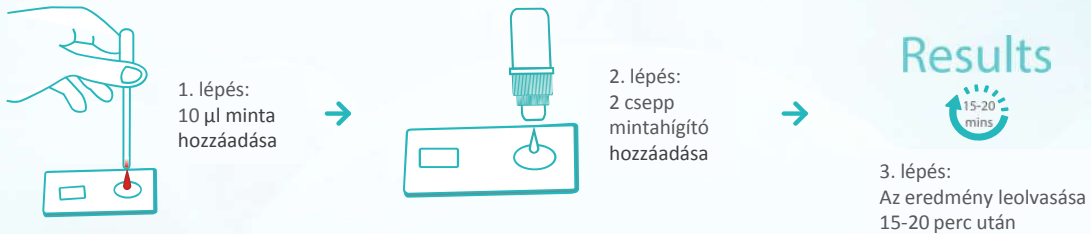


Klinikai teljesítmény

Összesen 378 mintát gyűjtöttek ehhez a klinikai vizsgálathoz, amelyből 128 megerősített COVID-19 diagnózissal rendelkezett az ideiglenes kórházból, míg 250 eset negatív volt, ez utóbbi mintákat 2019 szeptembere előtt gyűjtötték.


Klinikai teszt		qSARS CoV-2 IgG/IgM Gyorsteszt				Sub
		IgG+	IgG-	IgG+	IgG-	
Klinikai státusz	Pozitív	65	46	9	8	128
	Negatív	0	5	4	241	250
Összesen		65	51	13	249	378

Érzékenység: 93.75% (95% CI: 88.06%-97.26%) Specifitás: 96.40% (95% CI: 92.26%-97.78%)




Az eredmény értékelése

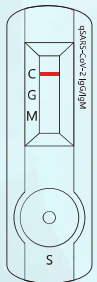



NEGATÍV

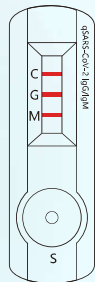

POZITÍV

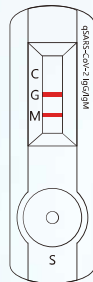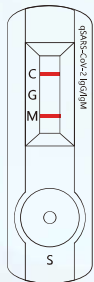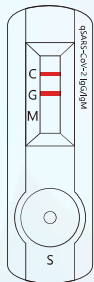

ÉRVÉNYTELEN

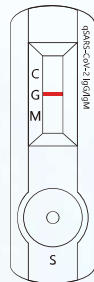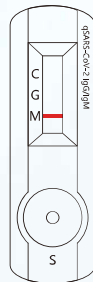

76 TW Alexander Drive,
Research Triangle Park, NC 27709-0002, USA | www.cellex.us | info@cellex.us

©2019 Cellex Inc. Minden jog fenntartva. A termék tulajdonságainak és specifikációjának változtatási jogát fenntartjuk, előzetes tájékoztatás nélkül. Nem szabad másolni és sokszorosítani.



